



Aisa

PORRASKIIPIJÄ SA-S

Kuin SA-3, mutta seuraavin eroavaisuuksin:

- Suurin sallittu kuorma 150 kg
- Tarvitsee ainoastaan 970 x 970 mm kokoisen tasanteen
- Pituus 80 mm lyhyempi



CAPACITY / TRAGLAST

150 kg

Helppo kuljettaa



Ajo-osa



Aloitusasento.



Avaa aisan lukko.



Vedä pyörätuoli porraskiipijän päälle.



Kiinnitä porraskiiپیjä pyörätuoliin.






Kiinnitä turvavyö.




Vedä aisa alas "klik" -ääneen ja siirry portaisiin.

Erilaisten porrastasanteiden minimilavaatimus porraskiiپیjän käytölle:

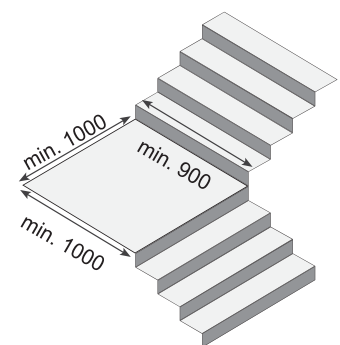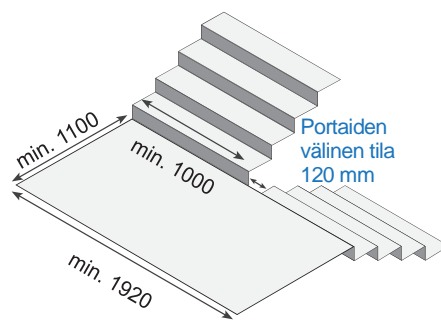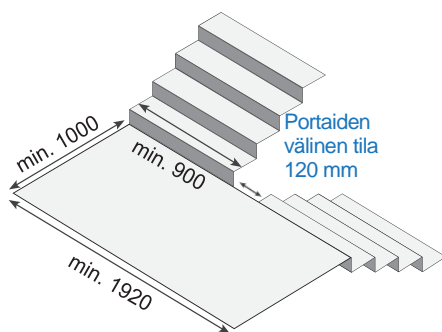

Maahantuonti, myynti ja huolto:

Apuväline Lähdemäki, Simakankatu 11, 30420 Forssa, P. 0400 – 483 258, sales@apuvälinelahde.fi, www.apuvälinelahde.fi

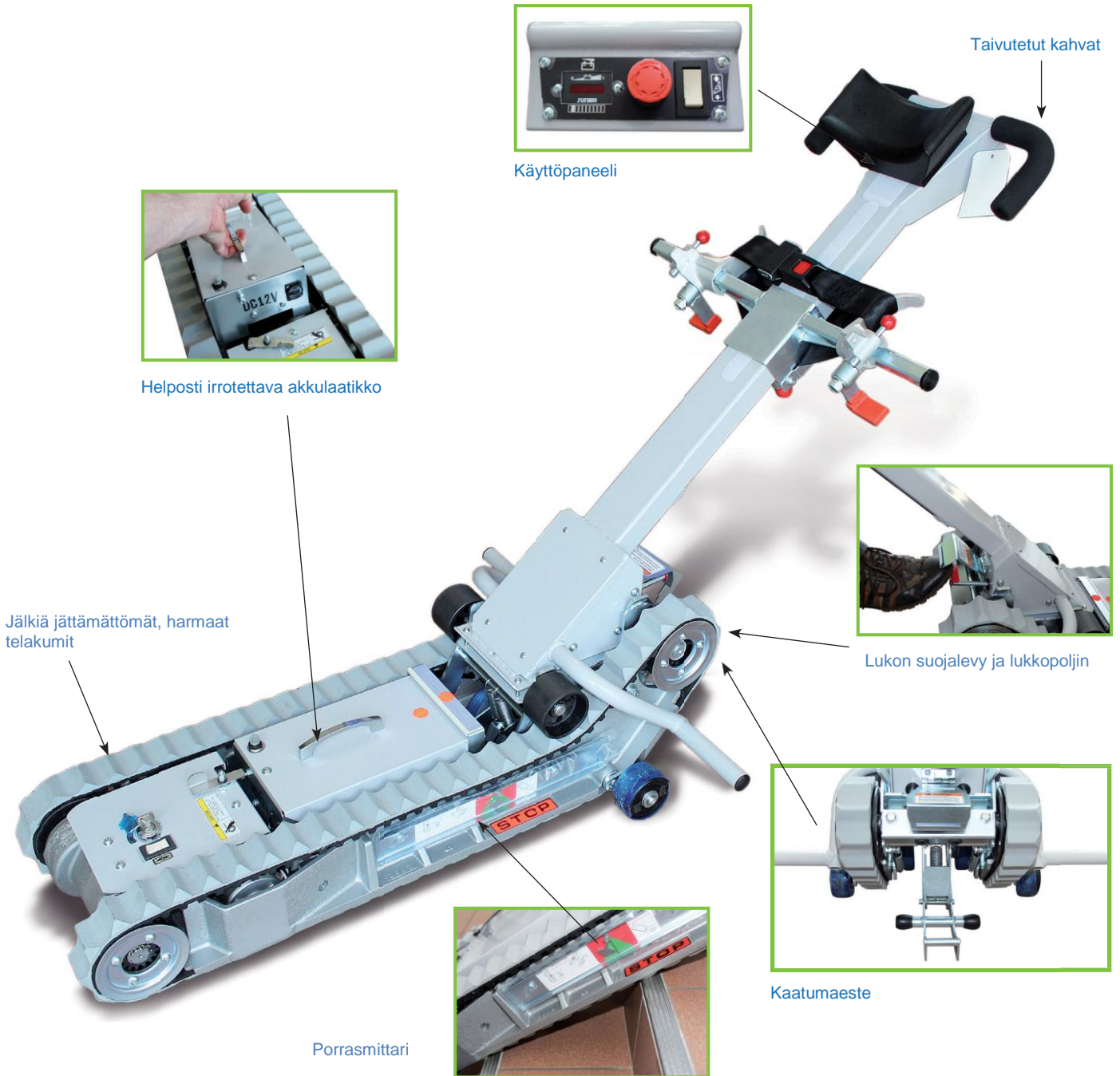

Tekniset tiedot		SA-S	
Suurin sallittu kuorma	kg		150
Ulkomitat	mm		1387 x 644 x 944
Paino	kg		59
Moottorin teho			210 W / 30 min. nimellisteho
Akut			Huoltovapaat, suljetut lyijyakut 2 x 6 V / 20 Ah / 20HR
Nopeus	Ylöspäin		6,1 m / min.
	Alaspäin		10,7 m / min.
Portaiden kulma			35°
Jarru			Elektromagneettinen jarru
Akun varausmittari			LED-näyttö
Lisävarusteet			
Automaattinen latauslaite	12 V / 2,5 A	Tilausno	333.252
Lasten pyörätuolien kuljetustaso		Tilausno	135.331

Maahantuonti, myynti ja huolto:

Apuväline Lähdemäki, Simakankatu 11, 30420 Forssa, P. 0400 – 483 258, sales@apuvälinelahde.fi, www.apuvälinelahde.fi